


Katzen-HLW-Puppe „CaPpeR“

Feline CPR Manikin „CaPpeR“



Bedienungsanleitung / User Manual

Art. Nr. / Item No. VET4880

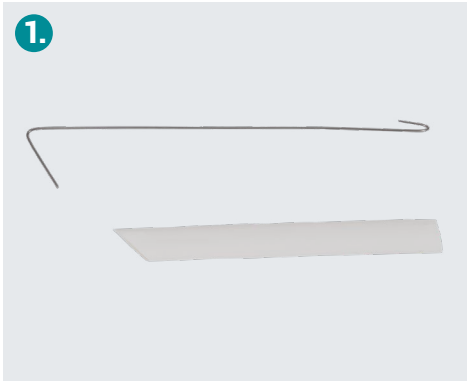

1.

Schritt 1:

Benutzen Sie folgendes mitgeliefertes Werkzeug, um die Lungenbeutel in das Modell einzuführen.

Step 1:

Use the following tool supplied to insert the lung bags into the model.




2.

Schritt 2:

Drücken Sie den Schrumpfschlauch und die Nasenlöcher der Katze zusammen.

Step 2:

Gently press the heat-shrink tubing and the cat's nostrils firmly together.

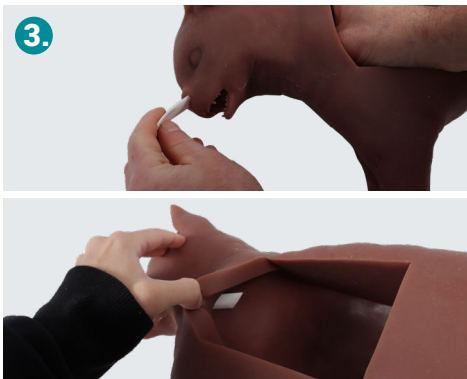

3.

Schritt 3:

Führen Sie den Schlauch vorsichtig durch die Nasenlöcher der Katze bis dieser im Hohlraum erscheint.

Step 3:

Pass the tube through the cat's nostrils until it appears in the cavity.




4.

Schritt 4:

Benutzen Sie folgendes mitgeliefertes Werkzeug, um die Lungenbeutel in das Modell einzuführen.

Step 4:

Use the following tool supplied to insert the lung bags into the model.

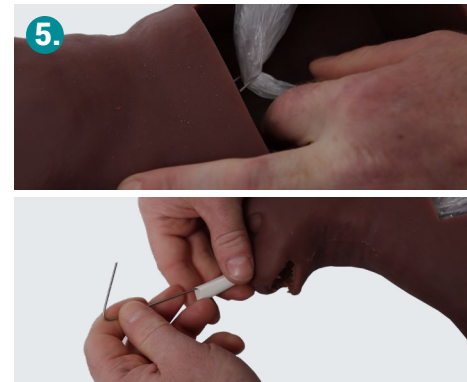

5.

Schritt 5:

Fädeln Sie den Lungenbeutel, mit der offenen Seite voran, in die verengte Stelle des Drahtes ein und ziehen diesen durch den Schrumpfschlauch zurück.

Step 5:

Thread the lung bag, with the open side first, into the constricted area of the drath and pull it back through the shrink tubing.



6.

Schritt 6:

Breiten Sie nun den Lungenbeutel über die Nase aus.

Step 6:

Now spread the lung bag over the nose.

7.



Schritt 7:

Breiten Sie den Lungenbeutel in dem Hohlraum aus. Setzen Sie den Schaumstoffblock in den Hohlraum.

Step 7:

Spread out the lung bag in the cavity. Place the foam block in the cavity.



8.



Schritt 8:

Legen Sie die Katze auf die flache Seite, so dass der Schaumstoffblock Richtung Boden zeigt. Der Simulator ist jetzt einsatzbereit.

Step 8:

Press the heat-shrink tubing and the cat's nostrils together. The simulator is now ready for use.